

INFORMACIÓN RESUMIDA DE SEGURIDAD DE BOLSA DE COLOSTOMÍA DE UNA PIEZA

DESCRIPCIÓN DEL DM



Dispositivo médico de plástico, de un solo uso; bolsa flexible que se ajusta alrededor de un ostoma (apertura quirúrgica de colon hacia la pared abdominal) y se utiliza después de una colostomía como receptáculo de excretas fecales. Sistema de una pieza con bolsa colectora abierta, se denomina también bolsa para colostomía autoadherible adulto o bolsa drenable para colostomía adulto.

Base de datos regional de Tecnovigilancia (TV)

Se encontró un caso de sospecha de Incidente Adverso a Dispositivo Médico (SIADM), se desprende muy rápido (no se adhiere hacia la piel del paciente) y se irrita la piel.

Competencias del usuario: Una enfermera especializada en ostoma puede ofrecer sugerencias si es necesario.

Advertencias y precauciones

Si su piel se irrita solamente en el punto donde la bolsa de plástico tiene contacto con su piel, puede cubrir la bolsa o probar otra marca de bolsa.

Quítese la barrera cutánea separando suavemente su piel de la barrera adhesiva en lugar de jalar la barrera de su piel.

Cuidadosamente, observe el ostoma y la piel alrededor de él cada vez que cambie la bolsa o la barrera. Si la piel alrededor del estoma está roja o húmeda, es posible que la bolsa no selle bien sobre el estoma. Algunas veces, el adhesivo, la barrera cutánea, la goma, la cinta o la bolsa pueden dañar la piel.

Recomendaciones

Antes de colocar la cubierta, la barrera cutánea o la bolsa, seque la piel por completo.

Cambio de bolsa: La frecuencia con la que se debe cambiar la bolsa depende del tipo de bolsa y de su llenado.

Sistemas de una pieza: Se cambia cada 12 o 24 horas, según lo llena que esté.

Vaciado: Se debe vaciar la bolsa cuando esté, aproximadamente, un tercio llena.

Retiro de la bolsa: Para retirar la bolsa, se debe despegar el adhesivo de arriba hacia abajo sin dar tirones.

Baño o ducha: Se puede quitar la bolsa al ducharse, pero no es necesario y no se recomienda. Si se toma un baño en la tina, se recomienda dejar la bolsa en su lugar.

Fuente bibliográfica :

<https://www.cancer.org/es/cancer/como-sobrellevar-el-cancer/tipos-de-tratamiento/cirugia/ostomias/colostomia/manejo.html>

https://www.essalud.gob.pe/ietsi/PETITORIO_DE_MATERIAL_MEDICO/pdf/MM-058.pdf

<https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/cuidados-casa/cuidados-estoma-digestivo>